

Check list DAE (Defibrillatore SemiAutomatico Esterno)

data _____ h _____ controllo effettuato da: _____

		Esito	
		positivo	negativo
Verificare presidi:			
a)	Integrità del DAE "Forerunner 2"		
b)	Corretto inserimento batteria		
c)	Corretto alloggiamento della smart card		
d)	Presenza 2 copie di elettrodi (sigillate, integre non scadute)		
e)	Presenza batteria di scorta sigillata (controllare scadenza)		
f)	Presenza 2 rasoio monouso		
g)	Presenza garze non sterili		
h)	Presenza di una smart card di scorta		

		Esito	
		positivo	negativo
Verifica sull'apparecchio:			
1°)	Presenza sul display (in alto a destra) della clessidra nera lampeggiante		
2°)	Se presente "X" rossa lampeggiante:		
a)	controllare alloggiamento batteria		
b)	Se esito positivo effettuare "autotest" seguendo le indicazioni della macchina		
c)	Se esito negativo (persiste "X" rossa) contattare la Centrale Operativa e attendere istruzioni.		
3°)	Premere tasto "ON/OFF" per verificare l'accensione: attendere le indicazioni della macchina: "applicare gli elettrodi sul torace" "inserire il connettore degli elettrodi vicino alla spia lampeggiante" (in alto a sinistra)		

Note, azioni correttive _____

Firma Operatore DAE (leggibile) _____